

FERTIGUNGSANWEISUNG

FÜR DIE EINARBEITUNG VON ORTHOPÄDISCHEN EINLAGEN IN SICHERHEITSSCHUHEN GEMÄSS DGUV REGEL 112-191

Diese Fertigungsanweisung definiert die einzelnen Arbeitsschritte und legt die zu verwendenden Materialkomponenten fest, die als orthopädische Einlagen für ELTEN-Sicherheitsschuhe verwendet werden dürfen. Die Anweisung ist notwendig, um die Konformität mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung auch noch nach Einarbeitung der orthopädischen Einlage zu gewährleisten. Bei Abweichung der Fertigung von dieser Anweisung erlischt die Gültigkeit der EU-Baumuster-Prüfbescheinigung und es besteht Haftungsrisiko!

ARBEITSSCHRITTE UND MATERIALKOMPONENTEN

- Diese Fertigungsanweisung gilt für den Einsatz der orthopädischen Einlagen-Rohlinge der Firma Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH.

ARTIKEL 9516

- Artikelbeschreibung: ESD-fähige Polstersohle, mit ganzflächiger Perforation, ohne zusätzliches Deckmaterial, mit antistatischem EVA-Einlagenelement, Ballen-Fersenpolster, zusätzlicher Fersenkeil einsetzbar und als ganzflächige Einlage einsetzbar.
- Basisprodukt ist der serienmäßig gefertigte Schuh aus dem zertifizierten ELTEN Sortiment. Diese orthopädische Einlage kann für die Artikel der Produktgruppen ELTEN Barefoot, ELTEN Biomex Dynamics, ELTEN Biomex Protection®, ELTEN Business, ELTEN Dimension Pro, ELTEN Ergo-Active, ELTEN E-Track, ELTEN Fire, ELTEN L10, ELTEN Fun, ELTEN Miss L10, ELTEN New Classics, ELTEN Nova, ELTEN Safety-Grip, ELTEN Safeguard, ELTEN Specials, ELTEN Trainers, ELTEN Trekking Lady, ELTEN Wellmaxx, ELTEN White und der LOWA Work Collection verwendet werden. (siehe Folgeseiten)
- Der EVA-Rohling kann entsprechend der gewünschten Fußbettung gefräst werden. Die Materialstärke dieser Einlegesohle darf im Zehenschutzkappenbereich maximal 3,0 mm betragen.
- Die Einlegesohle darf nicht mit anderen Materialien beschichtet werden, um die Bauhöhe und Antistatikwirkung der Einlegesohle weiterhin zu gewährleisten.
- Im Fersenbereich kann der antistatische Fersenkeil als Verkürzungsausgleich von bis zu 8 mm unterhalb der orthopädischen Einlage 9516 vorgenommen werden.
- Grundsätzlich ist der Einbau von Polsterungen oder eines Fersenkeils nur durch Verwendung des Bausatzes der Firma Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH möglich, welcher die notwendigen Materialkomponenten und Hilfsmaterialien bereitstellt. Zur Herstellung der Einlagen-Rohlinge darf ausschließlich der von der Firma Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH angebotene Klebstoff verwendet werden.

KENNZEICHNUNG

- Die orthopädische Veränderung ist im Schuh unterhalb der orthopädischen Einlage entsprechend durch das verändernde Organ zu kennzeichnen:
 - a) mit Name des Herstellers (Name des Orthopädiebetriebes)
 - b) mit der Typnummer. (siehe nachfolgende Tabelle)

FERTIGUNGSANWEISUNG**ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG DER EINLAGEN DER
MATTHIAS HARTMANN ORTHOPÄDIE + SPORT GMBH**

PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
BAREFOOTER	92230	APACHE black Low 01	414
BAREFOOTER	92220	APACHE black-white Low 01	414
BAREFOOTER	92240	APACHE white Low 01	414
BAREFOOTER	92260	KIOWA BOA® black Low 01	414
BAREFOOTER	92250	MAIDU black Low 01	414
BIOMEX DYNAMICS	712551	IMPULSE green Easy ESD S1P	369
BIOMEX DYNAMICS	722551	IMPULSE green Low ESD S1P	369
BIOMEX DYNAMICS	762551	IMPULSE green Mid ESD S1P	369
BIOMEX DYNAMICS	71245	IMPULSE grey Easy ESD S1	367
BIOMEX DYNAMICS	72245	IMPULSE grey Low ESD S1	367
BIOMEX DYNAMICS	72271	REACTION grey Low ESD S3	369
BIOMEX PROTECTION	765511	ARTURO black-red Mid ESD S3	384
BIOMEX PROTECTION	765521	NICOLO black Mid ESD S1P	384
BIOMEX PROTECTION	763421	RENZO Biomex ESD S3	14
BIOMEX PROTECTION	765421	RENZO Biomex GTX ESD S3 CI	27
BIOMEX PROTECTION	765501	TOMMASO green Mid ESD S1P	384
BUSINESS	71306	ADVISER Low ESD S2	85
BUSINESS	71301	ADVISER Low ESD S3	6
BUSINESS	76347	CHELSEA XW Mid ESD S2	200
BUSINESS	763371	NIKOLAS XW brown Mid ESD S3	195
BUSINESS	71307	OFFICER ESD S2	85
BUSINESS	972312	OFFICER GTX XW ESD 02	199
BUSINESS	72307	OFFICER XW ESD S2	200
DIMENSION PRO	71733	AMBITION blue Easy ESD S1	13
DIMENSION PRO	72733	AMBITION blue Low ESD S1	13
DIMENSION PRO	76733	AMBITION blue Mid ESD S1	13
DIMENSION PRO	72752	AMBITION BOA® Low ESD S2	18
DIMENSION PRO	76752	AMBITION BOA® Mid ESD S2	18
DIMENSION PRO	72721	DUSTIN BOA® Low ESD S3	75
DIMENSION PRO	727821	HORIZON Low ESD S3	75
DIMENSION PRO	767821	HORIZON Mid ESD S3	75
DIMENSION PRO	76643	MOTION Mesh Mid ESD S1	13
DIMENSION PRO	722851	REACTION blue Low ESD S3	75

**Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH**

Schelde-Lahn-Str. 20

Tel.: +49 (0) 2770 271 13-0

info@secosol.de

35713 Hirzenhain-Bahnhof

Fax: +49 (0) 2770 271 13-29

www.secsool.de | www.hartmann-os.com



FERTIGUNGSANWEISUNG**ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG DER EINLAGEN DER
MATTHIAS HARTMANN ORTHOPÄDIE + SPORT GMBH**

PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
DIMENSION PRO	762851	REACTION blue Mid ESD S3	75
DIMENSION PRO	72753	RUSHER Low ESD S1	13
ERGO-ACTIVE	7238401	ADAM ESD S1 Typ 1	127
ERGO-ACTIVE	7238402	ADAM ESD S1 Typ 2	127
ERGO-ACTIVE	7238403	ADAM ESD S1 Typ 3	127
ERGO-ACTIVE	7175101	ANTHONY red Easy ESD S1P Typ 1	388
ERGO-ACTIVE	7175102	ANTHONY red Easy ESD S1P Typ 2	388
ERGO-ACTIVE	7175103	ANTHONY red Easy ESD S1P Typ 3	388
ERGO-ACTIVE	7275101	ANTHONY red Low ESD S1P Typ 1	388
ERGO-ACTIVE	7275102	ANTHONY red Low ESD S1P Typ 2	388
ERGO-ACTIVE	7275103	ANTHONY red Low ESD S1P Typ 3	388
ERGO-ACTIVE	7675101	ANTHONY red Mid ESD S1P Typ 1	388
ERGO-ACTIVE	7675102	ANTHONY red Mid ESD S1P Typ 2	388
ERGO-ACTIVE	7675103	ANTHONY red Mid ESD S1P Typ 3	388
ERGO-ACTIVE	7279101	DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 1	392
ERGO-ACTIVE	7279102	DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 2	392
ERGO-ACTIVE	7279103	DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 3	392
ERGO-ACTIVE	7679101	DANIEL Pro Mid ESD S3 Typ 1	392
ERGO-ACTIVE	7679102	DANIEL Pro Mid ESD S3 Typ 2	392
ERGO-ACTIVE	7679103	DANIEL Pro Mid ESD S3 Typ 3	392
ERGO-ACTIVE	7207701	GRANT blue Low ESD S1 Typ 1	127
ERGO-ACTIVE	7207702	GRANT blue Low ESD S1 Typ 2	127
ERGO-ACTIVE	7207703	GRANT blue Low ESD S1 Typ 3	127
ERGO-ACTIVE	7225201	GRANT red Low ESD S1 Typ 1	127
ERGO-ACTIVE	7225202	GRANT red Low ESD S1 TYP 2	127
ERGO-ACTIVE	7225203	GRANT red Low ESD S1 TYP 3	127
ERGO-ACTIVE	7171501	IMPULSE EA blue Easy ESD S1 Typ 1	386
ERGO-ACTIVE	7171502	IMPULSE EA blue Easy ESD S1 Typ 2	386
ERGO-ACTIVE	7171503	IMPULSE EA blue Easy ESD S1 Typ 3	386
ERGO-ACTIVE	7271501	IMPULSE EA blue Low ESD S1 Typ 1	386
ERGO-ACTIVE	7271502	IMPULSE EA blue Low ESD S1 Typ 2	386
ERGO-ACTIVE	7271503	IMPULSE EA blue Low ESD S1 Typ 3	386

**Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH**

Schelde-Lahn-Str. 20

Tel.: +49 (0) 2770 271 13-0

info@secosol.de

35713 Hirzenhain-Bahnhof

Fax: +49 (0) 2770 271 13-29

www.secsool.de | www.hartmann-os.com



FERTIGUNGSANWEISUNG**ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG DER EINLAGEN DER
MATTHIAS HARTMANN ORTHOPÄDIE + SPORT GMBH**

PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
ERGO-ACTIVE	7272601	IMPULSE EA blue Low ESD S2 Typ 1	387
ERGO-ACTIVE	7272602	IMPULSE EA blue Low ESD S2 Typ 2	387
ERGO-ACTIVE	7272603	IMPULSE EA blue Low ESD S2 Typ 3	387
ERGO-ACTIVE	7672601	IMPULSE EA blue Mid ESD S2 Typ 1	387
ERGO-ACTIVE	7672602	IMPULSE EA blue Mid ESD S2 Typ 2	387
ERGO-ACTIVE	7672603	IMPULSE EA blue Mid ESD S2 Typ 3	387
ERGO-ACTIVE	7283101	MASON Pro GTX Low ESD S3 CI Typ 1	392
ERGO-ACTIVE	7283102	MASON Pro GTX Low ESD S3 CI Typ 2	392
ERGO-ACTIVE	7283103	MASON Pro GTX Low ESD S3 CI Typ 3	392
ERGO-ACTIVE	7683101	MASON Pro GTX Mid ESD S3 CI Typ 1	392
ERGO-ACTIVE	7683102	MASON Pro GTX Mid ESD S3 CI Typ 2	392
ERGO-ACTIVE	7683103	MASON Pro GTX Mid ESD S3 CI Typ 3	392
ERGO-ACTIVE	7281101	MASON Pro Low ESD S3 Typ 1	393
ERGO-ACTIVE	7281102	MASON Pro Low ESD S3 Typ 2	393
ERGO-ACTIVE	7281103	MASON Pro Low ESD S3 Typ 3	393
ERGO-ACTIVE	7681101	MASON Pro Mid ESD S3 Typ 1	393
ERGO-ACTIVE	7681102	MASON Pro Mid ESD S3 Typ 2	393
ERGO-ACTIVE	7681103	MASON Pro Mid ESD S3 Typ 3	393
ERGO-ACTIVE	7282101	MASON Pro Rubber Low ESD S3 HI Typ 1	397
ERGO-ACTIVE	7282102	MASON Pro Rubber Low ESD S3 HI Typ 2	397
ERGO-ACTIVE	7282103	MASON Pro Rubber Low ESD S3 HI Typ 3	397
ERGO-ACTIVE	7682101	MASON Pro Rubber Mid ESD S3 HI Typ 1	397
ERGO-ACTIVE	7682102	MASON Pro Rubber Mid ESD S3 HI Typ 2	397
ERGO-ACTIVE	7682103	MASON Pro Rubber Mid ESD S3 HI Typ 3	397
ERGO-ACTIVE	7215401	MATS ESD S2 Typ 1	128
ERGO-ACTIVE	7215402	MATS ESD S2 Typ 2	128
ERGO-ACTIVE	7215403	MATS ESD S2 Typ 3	128
ERGO-ACTIVE	7277101	MATTHEW Low ESD S3 Typ 1	392
ERGO-ACTIVE	7277102	MATTHEW Low ESD S3 Typ 2	392
ERGO-ACTIVE	7277103	MATTHEW Low ESD S3 Typ 3	392
ERGO-ACTIVE	7677101	MATTHEW Mid ESD S3 Typ 1	392
ERGO-ACTIVE	7677102	MATTHEW Mid ESD S3 Typ 2	392

**Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH**

Schelde-Lahn-Str. 20

Tel.: +49 (0) 2770 271 13-0

info@secosol.de

35713 Hirzenhain-Bahnhof

Fax: +49 (0) 2770 271 13-29

www.secosol.de | www.hartmann-os.com



FERTIGUNGSANWEISUNG**ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG DER EINLAGEN DER
MATTHIAS HARTMANN ORTHOPÄDIE + SPORT GMBH**

PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
ERGO-ACTIVE	7677103	MATTHEW Mid ESD S3 Typ 3	392
ERGO-ACTIVE	7278101	MATTHEW Pro GTX Low ESD S3 CI Typ 1	392
ERGO-ACTIVE	7278102	MATTHEW Pro GTX Low ESD S3 CI Typ 2	392
ERGO-ACTIVE	7278103	MATTHEW Pro GTX Low ESD S3 CI Typ 3	392
ERGO-ACTIVE	7678101	MATTHEW Pro GTX Mid ESD S3 CI Typ 1	392
ERGO-ACTIVE	7678102	MATTHEW Pro GTX Mid ESD S3 CI Typ 2	392
ERGO-ACTIVE	7678103	MATTHEW Pro GTX Mid ESD S3 CI Typ 3	392
ERGO-ACTIVE	7276101	MATTHEW TPU Low ESD S3 Typ 1	388
ERGO-ACTIVE	7276102	MATTHEW TPU Low ESD S3 Typ 2	388
ERGO-ACTIVE	7276103	MATTHEW TPU Low ESD S3 Typ 3	388
ERGO-ACTIVE	7676101	MATTHEW TPU Mid ESD S3 Typ 1	388
ERGO-ACTIVE	7676102	MATTHEW TPU Mid ESD S3 Typ 2	388
ERGO-ACTIVE	7676103	MATTHEW TPU Mid ESD S3 Typ 3	388
ERGO-ACTIVE	7247101	ROB ESD S3 Typ 1	93
ERGO-ACTIVE	7247102	ROB ESD S3 Typ 2	93
ERGO-ACTIVE	7247103	ROB ESD S3 Typ 3	93
ERGO-ACTIVE	7647101	RUBEN ESD S3 Typ 1	93
ERGO-ACTIVE	7647102	RUBEN ESD S3 Typ 2	93
ERGO-ACTIVE	7647103	RUBEN ESD S3 Typ 3	93
ERGO-ACTIVE	727301	SAMMY ESD S1 Typ 1	127
ERGO-ACTIVE	727302	SAMMY ESD S1 Typ 2	127
ERGO-ACTIVE	727303	SAMMY ESD S1 Typ 3	127
ERGO-ACTIVE	7670101	TILL BOA® EA Mid ESD S3 Typ 1	388
ERGO-ACTIVE	7670102	TILL BOA® EA Mid ESD S3 Typ 2	388
ERGO-ACTIVE	7670103	TILL BOA® EA Mid ESD S3 Typ 3	388
ERGO-ACTIVE	7273101	WILLIAM blue Low ESD S1P Typ 1	388
ERGO-ACTIVE	7273102	WILLIAM blue Low ESD S1P Typ 2	388
ERGO-ACTIVE	7273103	WILLIAM blue Low ESD S1P Typ 3	388
ERGO-ACTIVE	7274101	WILLIAM red Low ESD S1P Typ 1	388
ERGO-ACTIVE	7274102	WILLIAM red Low ESD S1P Typ 2	388
ERGO-ACTIVE	7274103	WILLIAM red Low ESD S1P Typ 3	388
E-TRACK	729611	JOURNEY black Low ESD S3	341

**Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH**

Schelde-Lahn-Str. 20

Tel.: +49 (0) 2770 271 13-0

info@secosol.de

35713 Hirzenhain-Bahnhof

Fax: +49 (0) 2770 271 13-29

www.secosol.de | www.hartmann-os.com



FERTIGUNGSANWEISUNG**ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG DER EINLAGEN DER
MATTHIAS HARTMANN ORTHOPÄDIE + SPORT GMBH**

PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
E-TRACK	729621	JOURNEY blue Low ESD S1P	341
E-TRACK	729641	JOURNEY blue-red Low ESD S1P	341
E-TRACK	729630	JOURNEY grey Low ESD S1	339
E-TRACK	729661	RUNAWAY black Low ESD S3	341
E-TRACK	729671	RUNAWAY brown Low ESD S3	341
E-TRACK	729685	WHITE Grip Low ESD S2	340
FIRE	89601	CLAY ESD F2A	440
FIRE	89631	COLIN GTX BOA® ESD F2A	440
FIRE	89641	CRAIG GTX ESD F2A	440
FIRE	89611	CRUZ GTX ESD F2A	440
FIRE	89621	CURT GTX ESD F2A	440
FUN	723381	MAVERICK black Low ESD S3	332
FUN	723391	MAVERICK black-red Low ESD S3	332
FUN	763391	MAVERICK black-red Mid ESD S3	332
FUN	723351	MAVERICK blue Low ESD S1P	332
FUN	723341	MAVERICK red Low ESD S3	332
L10	72109	BREEZER grey Low ESD S1	19
L10	762091	DELUXE GTX Mid ESD S3 Cl	299
L10	722081	DELUXE Low ESD S3	299
L10	782071	DESPERADO ESD S3	9
L10	761091	EMOTION ESD S3	11
L10	72081	GHOST BOA® Low ESD S3	265
L10	72071	GHOST Low ESD S3	265
L10	92110	MAROON Low ESD O2	5
L10	72110	MAROON Low ESD S2	10
L10	972220	NORRIS white-red Low ESD O1	20
L10	72322	PURE Easy ESD S1	37
L10	72312	PURE Slipper Low ESD S2	38
L10	72340	PURE Slipper Low ESD S2	38
L10	72106	SENSATION Low ESD S2	10
L10	76106	SENSATION Mid ESD S2	10
L10	72201	SENSATION Up Low ESD S3	299

**Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH**

Schelde-Lahn-Str. 20

Tel.: +49 (0) 2770 271 13-0

info@secosol.de

35713 Hirzenhain-Bahnhof

Fax: +49 (0) 2770 271 13-29

www.secsool.de | www.hartmann-os.com



FERTIGUNGSANWEISUNG**ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG DER EINLAGEN DER
MATTHIAS HARTMANN ORTHOPÄDIE + SPORT GMBH**

PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
L10	76201	SENSATION Up Mid ESD S3	299
L10	721081	SHADOW Low ESD S3	11
L10	761081	SHADOW Mid ESD S3	11
L10	72123	SKATER ESD S2	10
L10	721071	VINTAGE Low ESD S3	11
L10	761071	VINTAGE Mid ESD S3	11
L10	722071	VINTAGE Pirate Low ESD S3	9
L10	762071	VINTAGE Pirate Mid ESD S3	9
MISS L10	74171	GHOST Lady Low ESD S3	214
MISS L10	74106	SENSATION Lady Low ESD S2	213
MISS L10	74206	SENSATION Lady Mid ESD S2	213
MISS L10	74151	VINTAGE Lady black Low ESD S3	214
MISS L10	74251	VINTAGE Lady black Mid ESD S3	214
MISS L10	74101	VINTAGE Lady Low ESD S3	214
MISS L10	74201	VINTAGE Lady Mid ESD S3	214
NEW CLASSICS	76685	BEN ESD S2	316
NEW CLASSICS	72685	BRUNO ESD S2	316
NEW CLASSICS	716271	LASLO ESD S1P	317
NEW CLASSICS	72623	LEN ESD S2	316
NEW CLASSICS	726231	LEN ESD S3	318
NEW CLASSICS	72628	LEROY Low ESD S2	316
NEW CLASSICS	726281	LEROY Low ESD S3	317
NEW CLASSICS	76628	LEROY Mid ESD S2	316
NEW CLASSICS	766281	LEROY Mid ESD S3	317
NEW CLASSICS	76623	LEX ESD S2	316
NEW CLASSICS	766231	LEX ESD S3	318
NEW CLASSICS	766241	LEX Steel ESD S3	317
NOVA	74801	IMPULSE Lady aqua Easy ESD S1P	323
NOVA	74811	IMPULSE Lady aqua Low ESD S1P	323
NOVA	74831	IMPULSE Lady BOA® aqua Low ESD S1P	323
NOVA	74841	IMPULSE Lady BOA® aqua Mid ESD S1P	323
NOVA	74751	LINDA red Low ESD S3	322

**Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH**

Schelde-Lahn-Str. 20

Tel.: +49 (0) 2770 271 13-0

info@secosol.de

35713 Hirzenhain-Bahnhof

Fax: +49 (0) 2770 271 13-29

www.secsool.de | www.hartmann-os.com



FERTIGUNGSANWEISUNG**ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG DER EINLAGEN DER
MATTHIAS HARTMANN ORTHOPÄDIE + SPORT GMBH**

PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
NOVA	74770	MAJA Easy ESD S1	320
NOVA	74771	MAJA Easy ESD S1P	323
NOVA	74741	MAJA GTX Mid ESD S3	322
NOVA	74780	MAJA Low ESD S2	321
NOVA	74781	MAJA Low ESD S3	323
NOVA	74790	MAJA Mid ESD S2	321
NOVA	74791	MAJA Mid ESD S3	323
NOVA	74820	MIEKE Low ESD S2	321
NOVA	74710	MILA aqua Easy ESD S1	320
NOVA	74720	MILA aqua Low ESD S1	320
SAFEGUARD	76591	JOHNNY ESD S3 CI	284
SAFEGUARD	76521	JOSCHI ESD S3 CI	284
SAFEGUARD	76531	JOSCHI GTX ESD S3 CI	284
SAFEGUARD	768551	SANDER AL ESD S3	284
SAFEGUARD	768531	SANDER BOA® ESD S3	284
SAFEGUARD	727651	SCOTT BOA® ESD S1P	284
SAFEGUARD	728551	SENEX AL ESD S3	284
SAFEGUARD	728531	SENEX BOA® ESD S3	284
SAFETY-GRIP	727541	ALESSIO Low ESD S3	14
SAFETY-GRIP	767541	ALESSIO Mid ESD S3	14
SAFETY-GRIP	727641	ALESSIO Steel Low ESD S3	27
SAFETY-GRIP	767641	ALESSIO Steel Mid ESD S3	27
SAFETY-GRIP	767741	ALESSIO Steel Rubber Mid ESD S3	91
SAFETY-GRIP	767761	ALESSIO Steel Rubber XW Mid ESD S3	205
SAFETY-GRIP	767771	ALESSIO Steel Rubber XXW Mid ESD S3	205
SAFETY-GRIP	727661	ALESSIO Steel XW Low ESD S3	203
SAFETY-GRIP	767661	ALESSIO Steel XW Mid ESD S3	203
SAFETY-GRIP	727671	ALESSIO Steel XXW Low ESD S3	203
SAFETY-GRIP	767671	ALESSIO Steel XXW Mid ESD S3	203
SAFETY-GRIP	68461	JORIS GTX S3 CI	91
SAFETY-GRIP	727451	LAURENZO BOA® Low ESD S3	14
SAFETY-GRIP	767451	LAURENZO BOA® Mid ESD S3	14

**Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH**

Schelde-Lahn-Str. 20

Tel.: +49 (0) 2770 271 13-0

info@secosol.de

35713 Hirzenhain-Bahnhof

Fax: +49 (0) 2770 271 13-29

www.secosol.de | www.hartmann-os.com



FERTIGUNGSANWEISUNG**ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG DER EINLAGEN DER
MATTHIAS HARTMANN ORTHOPÄDIE + SPORT GMBH**

PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENUMMER
SAFETY-GRIP	766841	LAURENZO PU Mid ESD S3	14
SAFETY-GRIP	766941	LAURENZO Rubber Mid ESD S3	67
SAFETY-GRIP	766961	LAURENZO Rubber XW Mid ESD S3	204
SAFETY-GRIP	766981	LAURENZO Rubber XXW Mid ESD S3	204
SAFETY-GRIP	60561	LUTZ S3 HI	91
SAFETY-GRIP	65461	RENZO D30® Mid S3	91
SAFETY-GRIP	67471	RENZO Glass S3 CR	91
SAFETY-GRIP	765451	RENZO GTX Mid ESD S3 CI	27
SAFETY-GRIP	765481	RENZO GTX XW Mid ESD S3 CI	203
SAFETY-GRIP	765491	RENZO GTX XXW Mid ESD S3 CI	203
SAFETY-GRIP	725841	RENZO Low ESD S3	27
SAFETY-GRIP	765841	RENZO Mid ESD S3	27
SAFETY-GRIP	764751	RENZO S High ESD S3 HI	91
SAFETY-GRIP	65741	RENZO Winter S3 CI	14
SAFETY-GRIP	725861	RENZO XW Low ESD S3	203
SAFETY-GRIP	765861	RENZO XW Mid ESD S3	203
SAFETY-GRIP	725881	RENZO XXW Low ESD S3	203
SAFETY-GRIP	765881	RENZO XXW Mid ESD S3	203
SAFETY-GRIP	78671	RIGGER Boot ESD S3 CI	14
SAFETY-GRIP	721191	TILL Low ESD S3 HI	44
SAFETY-GRIP	761191	TILL Mid ESD S3 HI	44
SAFETY-GRIP	72061	TOBY Low ESD S3 HI	44
SAFETY-GRIP	76061	TOBY Mid ESD S3 HI	44
SAFETY-GRIP	86771	WILL S3 CI	27
SPECIALS	88781	ARBORIST GTX S3 CI	66
SPECIALS	64461	CARL S3 HI	91
TRAINERS	72178	EASY blue ESD S1	49
TRAINERS	72170	MOTION Air ESD S1	311
TRAINERS	72182	MOTION Low ESD S2	312
TRAINERS	728781	NICK ESD S3	32
TRAINERS	76872	SANDER ESD S2	312
TRAINERS	768321	SANDER ESD S3	56

**Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH**

Schelde-Lahn-Str. 20
35713 Hirzenhain-Bahnhof

Tel.: +49 (0) 2770 271 13-0
Fax: +49 (0) 2770 271 13-29

info@secosol.de
www.secsool.de | www.hartmann-os.com



FERTIGUNGSANWEISUNG**ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG DER EINLAGEN DER
MATTHIAS HARTMANN ORTHOPÄDIE + SPORT GMBH**

PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
TRAINERS	766771	SANDER Pro ESD S3	56
TRAINERS	768571	SANDER Pro GTX ESD S3	56
TRAINERS	71872	SCOTT ESD S1	311
TRAINERS	72121	SCOTT ESD S1P	56
TRAINERS	726661	SCOTT Pro ESD S1P	56
TRAINERS	72872	SENEX ESD S2	312
TRAINERS	728321	SENEX ESD S3	56
TRAINERS	726771	SENEX Pro ESD S3	56
TRAINERS	728571	SENEX Pro GTX ESD S3	56
TRAINERS	72131	SID ESD S3	56
TRAINERS	72138	STEPHEN ESD S1	49
TRAINERS	72825	SUNNY ESD S1	49
TRAINERS	72622	TRIBUTE black Low ESD S2	312
TREKKING LADY	742121	LENA black-blue Low ESD S3	426
TREKKING LADY	746121	LENA black-blue Mid ESD S3	426
TREKKING LADY	742141	LENA blue Low ESD S3	425
TREKKING LADY	746141	LENA blue Mid ESD S3	425
TREKKING LADY	742151	LENA BOA® Low ESD S3	425
TREKKING LADY	746151	LENA BOA® Mid ESD S3	425
TREKKING LADY	742131	LENA GTX black-red Low ESD S3 CI	425
TREKKING LADY	746131	LENA GTX black-red Mid ESD S3 CI	425
TREKKING LADY	746171	LILLY black High ESD S3 CI	425
TREKKING LADY	746161	LILLY black Mid ESD S3	425
TREKKING LADY	742102	LOTTE aqua Low ESD S2	424
TREKKING LADY	746102	LOTTE aqua Mid ESD S2	424
TREKKING LADY	742111	LOTTE GTX blue Low ESD S3 CI	425
TREKKING LADY	746111	LOTTE GTX blue Mid ESD S3 CI	425
WELLMAXX	729925	BREEZER XX10 Low ESD S1	418
WELLMAXX	729310	BROKER XXB black Low ESD S1	430
WELLMAXX	729311	BROKER XXB black Low ESD S1P	432
WELLMAXX	729596	BROKER XXB blue Low ESD S1	430
WELLMAXX	729593	DIRECTOR XXB black Low ESD S1	430

**Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH**

Schelde-Lahn-Str. 20

Tel.: +49 (0) 2770 271 13-0

info@secosol.de

35713 Hirzenhain-Bahnhof

Fax: +49 (0) 2770 271 13-29

www.secsool.de | www.hartmann-os.com



FERTIGUNGSANWEISUNG**ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG DER EINLAGEN DER
MATTHIAS HARTMANN ORTHOPÄDIE + SPORT GMBH**

PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
WELLMAXX	729594	DIRECTOR XXB blue Low ESD S1	430
WELLMAXX	729592	DIRECTOR XXB grey Low ESD S1	430
WELLMAXX	719460	ETHAN Easy ESD S1	302
WELLMAXX	741531	HANNAH XXTL black-red Easy ESD S1P	462
WELLMAXX	742531	HANNAH XXTL black-red Low ESD S3	462
WELLMAXX	746531	HANNAH XXTL black-red Mid ESD S3	462
WELLMAXX	742561	HANNAH XXTL BOA® black-red Low ESD S3	462
WELLMAXX	746561	HANNAH XXTL BOA® black-red Mid ESD S3	462
WELLMAXX	742581	HENNY XXTL black Low ESD S3	462
WELLMAXX	746581	HENNY XXTL black Mid ESD S3	462
WELLMAXX	741301	IMPULSE Lady XXTL blue Easy ESD S1P	462
WELLMAXX	742301	IMPULSE Lady XXTL blue Low ESD S1P	462
WELLMAXX	719755	IMPULSE XXT blue Easy ESD S1	398
WELLMAXX	729755	IMPULSE XXT blue Low ESD S1	398
WELLMAXX	729711	LAKERS XXT Low ESD S1P	400
WELLMAXX	769711	LAKERS XXT Mid ESD S1P	400
WELLMAXX	974610	LANA black-red Low ESD O1	78
WELLMAXX	729691	LANCE black Low ESD S1P	377
WELLMAXX	729695	LANCE grey Low ESD S1	375
WELLMAXX	729505	LONDON grey Low ESD S1	375
WELLMAXX	728110	LARKIN XXSports black-blue Low ESD S1	122
WELLMAXX	728111	LARKIN XXSports black-grey Low ESD S1P	124
WELLMAXX	728101	LARKIN XXSports blue Low ESD S1P	124
WELLMAXX	729601	LELAND blue Low ESD S1P	377
WELLMAXX	729581	LELAND GTX grey Low ESD S3	377
WELLMAXX	729591	LELAND GTX lime Low ESD S3	377
WELLMAXX	729425	LOGAN blue Low ESD S1	302
WELLMAXX	729525	LONNY blue Low ESD S1	375
WELLMAXX	719521	LONNY red Easy ESD S1P	377
WELLMAXX	729521	LONNY red Low ESD S1P	377
WELLMAXX	749531	MADDIE grey Easy ESD S1P	377
WELLMAXX	949502	MADDIE grey Low ESD O1	78

**Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH**

Schelde-Lahn-Str. 20

Tel.: +49 (0) 2770 271 13-0

info@secosol.de

35713 Hirzenhain-Bahnhof

Fax: +49 (0) 2770 271 13-29

www.secosol.de | www.hartmann-os.com



FERTIGUNGSANWEISUNG**ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG DER EINLAGEN DER
MATTHIAS HARTMANN ORTHOPÄDIE + SPORT GMBH**

PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
WELLMAXX	749501	MADDIE grey Low ESD S1P	377
WELLMAXX	929563	MADDOX black leather Low ESD O2	79
WELLMAXX	729461	MADDOX black-grey Low ESD S3	377
WELLMAXX	929652	MADDOX black-red Low ESD O2	79
WELLMAXX	729561	MADDOX black-red Low ESD S3	377
WELLMAXX	769561	MADDOX black-red Mid ESD S3	377
WELLMAXX	729571	MADDOX blue Low ESD S1P	377
WELLMAXX	729161	MADDOX BOA® black-grey Low ESD S3	377
WELLMAXX	729151	MADDOX BOA® black-red Low ESD S3	377
WELLMAXX	769151	MADDOX BOA® black-red Mid ESD S3	377
WELLMAXX	729631	MADDOX darkblue Low ESD S3	377
WELLMAXX	729551	MADDOX grey-blue Low ESD S1P	377
WELLMAXX	769551	MADDOX grey-blue Mid ESD S1P	377
WELLMAXX	729241	MADDOX GTX W black-red Low ESD S3 CI	437
WELLMAXX	769241	MADDOX GTX W black-red Mid ESD S3 CI	437
WELLMAXX	729231	MADDOX W black-grey Low ESD S3	437
WELLMAXX	729201	MADDOX W black-red Low ESD S3	437
WELLMAXX	729651	MADDOX W yellow Low ESD S3	437
WELLMAXX	729511	MALCOLM blue Low ESD S1P	377
WELLMAXX	729501	MALCOLM grey Low ESD S1P	377
WELLMAXX	729541	MALVIN blue Low ESD S3	377
WELLMAXX	769541	MALVIN blue Mid ESD S3	377
WELLMAXX	723231	MANAGER XXB Low ESD S3	432
WELLMAXX	972540	MARC black Low ESD O2	79
WELLMAXX	972530	MARC white Low ESD O2	79
WELLMAXX	728121	MARTEN XXSports blue Low ESD S1P	124
WELLMAXX	768121	MARTEN XXSports blue Mid ESD S1P	124
WELLMAXX	728160	MARTEN XXSports grey-red Low ESD S1	122
WELLMAXX	728131	MARTEN XXSports Pro black Low ESD S3	124
WELLMAXX	768131	MARTEN XXSports Pro black Mid ESD S3	124
WELLMAXX	728141	MARTEN XXSports Pro BOA® black-blue Low ESD S3	124
WELLMAXX	768141	MARTEN XXSports Pro BOA® black-blue Mid ESD S3	124

**Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH**

Schelde-Lahn-Str. 20

Tel.: +49 (0) 2770 271 13-0

info@secosol.de

35713 Hirzenhain-Bahnhof

Fax: +49 (0) 2770 271 13-29

www.secosol.de | www.hartmann-os.com



FERTIGUNGSANWEISUNG**ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG DER EINLAGEN DER
MATTHIAS HARTMANN ORTHOPÄDIE + SPORT GMBH**

PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
WELLMAXX	728181	MARTY XXSports Low ESD S3	124
WELLMAXX	729451	MILES Low ESD S3	304
WELLMAXX	769451	MILES Mid ESD S3	304
WELLMAXX	729440	MILOW Low ESD S2	303
WELLMAXX	729920	NED XX10 black Low ESD S2	419
WELLMAXX	729910	NEWTON XX10 black Low ESD S2	419
WELLMAXX	769910	NEWTON XX10 black Mid ESD S2	419
WELLMAXX	729905	NEWTON XX10 blue Low ESD S2	419
WELLMAXX	769905	NEWTON XX10 blue Mid ESD S2	419
WELLMAXX	729915	NOEL XX10 black Low ESD S2	419
WELLMAXX	769921	NORMAN XX10 Mid ESD S3	420
WELLMAXX	72302	OFFICER XXB Low ESD S2	431
WELLMAXX	729701	REACTION XXT Low ESD S3	400
WELLMAXX	769701	REACTION XXT Mid ESD S3	400
WELLMAXX	729851	REACTION XXT Pro BOA® Low ESD S3	400
WELLMAXX	769851	REACTION XXT Pro BOA® Mid ESD S3	400
WELLMAXX	769731	SANDER XXT ESD S3	400
WELLMAXX	769831	SANDER XXT Pro BOA® ESD S3	400
WELLMAXX	719731	SCOTT XXT ESD S1P	400
WELLMAXX	729731	SENEX XXT ESD S3	400
WELLMAXX	729831	SENEX XXT Pro BOA® ESD S3	400
WELLMAXX	729901	SENSATION XX10 Low ESD S3	420
WELLMAXX	769901	SENSATION XX10 Mid ESD S3	420
WELLMAXX	729720	SENSATION XXT Low ESD S2	399
WELLMAXX	769720	SENSATION XXT Mid ESD S2	399
WELLMAXX	769752	TIMOTHY XXT GTX Mid ESD S2 CI	399
WELLMAXX	719820	TRAVIS XXT grey-red Easy ESD S1	398
WELLMAXX	729820	TRAVIS XXT grey-red Low ESD S2	399
WHITE	72015	WHITE Easy Low ESD S1	210
WHITE	72016	WHITE Loop Low ESD S2	211
WHITE	76016	WHITE Loop Mid ESD S2	211
WHITE	72498	WHITE Slipper Low ESD S2	211

**Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH**

Schelde-Lahn-Str. 20

Tel.: +49 (0) 2770 271 13-0

info@secosol.de

35713 Hirzenhain-Bahnhof

Fax: +49 (0) 2770 271 13-29

www.secsool.de | www.hartmann-os.com



FERTIGUNGSANWEISUNG**ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG DER EINLAGEN DER
MATTHIAS HARTMANN ORTHOPÄDIE + SPORT GMBH**

PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
WHITE	720171	WHITE Strap Low ESD S3	212
WHITE	760171	WHITE Strap Mid ESD S3	212
LOWA	5420	LARROX Work GTX black Lo S3 CI	412
LOWA	5460	LARROX Work GTX black Mid S3 CI	412
LOWA	5426	LARROX Work GTX blue Lo S3 CI	412
LOWA	5466	LARROX Work GTX blue Mid S3 CI	412
LOWA	5424	LARROX Work GTX grey Lo S3 CI	412
LOWA	5464	LARROX Work GTX grey Mid S3 CI	412
LOWA	5422	LARROX Work GTX red Lo S3 CI	412
LOWA	5462	LARROX Work GTX red Mid S3 CI	412
LOWA	5765	PHANTOM Work GTX High S3 CI	52
LOWA	5760	PHANTOM Work GTX Mid S3 CI	52
LOWA	5614	RENEGADE Work GTX black Lo S3 CI	3
LOWA	5654	RENEGADE Work GTX black Mid S3 CI	3
LOWA	5610	RENEGADE Work GTX green Lo S3 CI	3
LOWA	5650	RENEGADE Work GTX green Mid S3 CI	3
LOWA	5612	RENEGADE Work GTX red Lo S3 CI	3
LOWA	5652	RENEGADE Work GTX red Mid S3 CI	3

**Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH**

Schelde-Lahn-Str. 20

Tel.: +49 (0) 2770 271 13-0

info@secosol.de

35713 Hirzenhain-Bahnhof

Fax: +49 (0) 2770 271 13-29

www.secsool.de | www.hartmann-os.com

